

## ENZYMA

**SK** Enzymatický detergent na odstraňovanie biologickej záťaže na predmetoch a zdravotníckych pomôckach. Používa sa v predsterilizačnej príprave.

**Obsahuje:** alkoholy, C12-15- rozvetvené a lineárne, etoxylované (>5 - <15 EO)

**Zloženie:** 5 % alebo viac, ale menej ako 15% : neiónové povrchovo aktívne látky, 5 % alebo viac, ale menej ako 15%: aniónové povrchovo aktívne látky, menej ako 5 %: amfotérne povrchovo aktívne látky, subtilizín, konzervačné činidlo: 2-bromo-2- nitropropane – 1,3 - diol.

Obsahuje subtilizín. Môže vyvolať alergickú reakciu.

**Fyzikálne a chemické vlastnosti:** tekutina červenej farby, bez zápachu.

**Spôsob použitia:** kontaminované predmety sa ponoria do roztoku na predpísanú expozíciu. Po expozícii sa vyberú a opláchnu. Následne sa vykoná dezinfekcia.

Použitie	Dávkovanie	Expozícia
Čistenie kontaminovaných predmetov	0,25 – 1% (25-100 ml/10l vody) prispôsobujú sa stupňu znečistenia	15-10 min.

Príprava pracovného roztoku: do vody teplej 30 – 35 °C sa nadávkuje príslušné množstvo prípravku a mierne zamieša.

**Oblasť použitia:** zdravotníctvo, endoskopické pracoviská, veterinárne lekárstvo. Prípravok je určený len pre profesionálne použitie.

**Materiálová znášanlivosť:** prípravok nepoškodzuje predmety z ušľachtilej ocele, gummy, latexu a plastov. Nepoškodzuje optické nástroje.

**Bezpečnostné upozornenie:**

H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí. P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. P280 Noste ochranné rukavice/ ochranný odev/ochranu očí/ ochranu tváre. P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. P310 Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára. P501 - Zneškodnite obsah/nádobu odovzdaním osobe oprávnenej pre nakladanie s odpadmi alebo na miesto určené obcou.

Skladovať v originálnom, riadne uzavretom obale, na suchom dobre vetranom mieste.

**Expiračná doba: 24 mesiacov od dátumu výroby** (dátum výroby a dátum spotreby uvedený na obale).

**CZ Enzymatický detergent na odstraňování biologické zátěže z předmětů a zdravotnických pomůcek. Používá se v předsterilizační přípravě.**

**Obsahuje:** alkoholy, C12-15- rozvetvené a lineární, etoxylované (>5 - <15 EO)

**Složení:** 5 % nebo více, avšak méně než 15%: neiontové povrchově aktivní látky, 5 % nebo více, avšak méně než 15%: aniontové povrchově aktivní látky, méně než 5 %: amfoterní povrchově aktivní látky, subtilisin, konzervační činidlo: 2-bromo-2-nitropropane–1,3-diol.

Obsahuje subtilisin. Může vyvolať alergickou reakci.

**Fyzikální a chemické vlastnosti:** tekutina červené barvy, bez zápachu

**Způsob použití:** kontaminované předměty se ponoří do roztoku po dobu předepsané expozice.

Následně se vykoná dezinfekce.

Použití	Dávkování	Expozice
Čištění kontaminovaných předmětů	0,25 – 1% (25-100 ml/10l vody) přizpůsobuje se stupni znečištění	15-10 min.

Příprava pracovního roztoku: do vody o teplotě 30 – 35 °C se nadávkuje příslušné množství přípravku a mírně se zamíchá.

**Oblast použití:** zdravotnictví, endoskopická pracoviště, veterinární lékařství. Přípravek je určen pouze pro profesionální použití.

**Materiálová snášenlivost:** Přípravek je dobře snášen materiály z gumy, ušlechtilé oceli, latexu a plastických hmot. Nepoškozuje optiku.

**Bezpečnostní upozornění:**

Způsobuje vážné poškození očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

Odstraňte obsah/obal v souladu s místními předpisy předáním osobě oprávněné k likvidaci odpadů nebo na místo určené obcí.

Skladujte v originálních, řádně uzavřených obalech na suchém, dobře větraném místě.

**Expirační doba:** 24 měsíců od data výroby (datum výroby a datum spotřeby uvedeno na obalu)

**Vyrába/ vyrábí: BANCHEM, s.r.o.,** Rybný trh 332/9, P.O. Box 164, tel.: +421 31/591 08 01, 929 01 Dunajská Streda, SR, Karta údajov o zložkách: www.banchem.sk, **Národné toxikologické informačné centrum,** Bratislava, SR, +421 2 547 741 66, +421 911 166 066

**Distributor: BANCHEM CZ s.r.o.,** Ostopovická 619/8, Brno-Bosonohy 64200, ČR, +421 31/591 08 01, **Toxikologické informační středisko,** 128 08 Praha 2, Na Bojišti 1, ČR, Tel.: +420 224 919 293, +420 224 915 402 (24 hod/den)

Objem/ obsah: 1000 ml

EAN: 8586000284326

**UFI: MS50-X051-Y00R-4TV9**



**Nebezpečnostvo /Nebezpečí**

(poznámka pre p. grafičku: na vytlačenej etikete strany piktogramu od cípu po cíp majú byť 1,6 x 1, 6 cm)